

## НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Напульсник предназначен для использования в домашних условиях после занятий спортом и физических нагрузок, при ощущении усталости и дискомфорта в области лучезапястного сустава.

## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ С УКАЗАНИЕМ ВИДА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОНТАКТА С ОРГАНИЗМОМ

Напульсник представляет собой изделие, состоящее из двух чехлов: внутреннего и наружного. Внутри изделия находятся герметично проклеенные тканевые модули с наполнителем, состоящим из смеси стеклянных полых микросфер и диоксида кремния осажденного. Тканевые модули с наполнителем соединены между собой, накрыты внутренним, а затем наружным чехлами и сшиты между собой. Для чехлов применяется специальная водоотталкивающая ткань. Первую неделю изделие необходимо применять от 15 до 30 минут в день. Время можно увеличивать постепенно, в течение 2-х – 3-х недель. Начиная с 3-й – 4-й недели, применять без ограничений по времени. Во время применения изделия необходимо увеличить потребление питьевой воды.

## МЕРЫ ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

При использовании изделий рекомендуется применять наволочки или чехлы из натуральных тканей. При эксплуатации изделие твердеет. При затвердевании наполнителя встряхните изделие или положите у источника тепла до размягчения наполнителя. При нарушении целостности внутреннего чехла изделия необходимо упаковать в плотный герметичный пакет и утилизировать с бытовыми отходами, исключая канализацию.

## КАК РАЗМЯГЧИТЬ ИЗДЕЛИЕ?

1. Греть на любом источнике тепла, батарея, теплые полы, солнышко и т.д.
2. Оставить открытое окно и положить на подоконник, на свежий воздух или на улицу, если есть возможность.
3. Интересный способ, нам посоветовал один физик, наш клиент, поставить изделие в угол, очень эффективно работает.

## СПОСОБ УХОДА ЗА СЪЕМНЫМ ЧЕХЛОМ

Для удаления загрязнений с поверхности чехла, рекомендуется ручная и автоматическая стирка. Температура воды не должна превышать 40 °С. При автоматической стирке отжим не должен превышать 800 об/мин. После высыхания чехол готов к эксплуатации.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

- Стирка изделий не допускается.
- Не использовать стиральный порошок.
- Не гладить с применением пара
- Не отбеливать.
- Не подвергать изделие химической чистке.
- Не рвать, не колоть.
- Не подвергать резким нагрузкам (прыжки, падения и др.) для сохранности целостности швов.

## СПОСОБ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Напульсник надевается на лучезапястный сустав и фиксируется текстильными застежками. При использовании изделие принимает форму, удобную именно для человека, при этом не стремится вернуть свою форму и не оказывает обратного давления. Это является важным и существенным свойством при использовании для восстановления ослабленных проблемных зон организма.

## СПОСОБ УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Для удаления загрязнений с поверхности, рекомендуется нанести мыльный раствор (температурой не выше 40°C) мягкой губкой (желательно из хозяйственного мыла или БИО разлагаемого чистящего средства, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА) и очистить поверхность от загрязнения. Смойте остатки мыльного раствора под проточной водой или под душем (без полного погружения в воду). Отжимать изделия не рекомендуется. Сушить изделия рекомендуется на сушилке, на свежем воздухе или на батарее. После высыхания изделие готово к эксплуатации. Для защиты и продления службы, данное изделие может иметь дополнительную комплектацию – защитный чехол.

## НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА, КОТОРОМУ СООТВЕТСТВУЕТ ИЗДЕЛИЕ

ТУ 13.92.24-026-17968585-2022.

## ОБОЗНАЧЕНИЕ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩЕЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ ИЗДЕЛИЯ

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RUД-RU.PA01.B.06613/22 от 15.04.2022

## ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления указана в маркировке на упаковке изделия.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО НПО Технологии и продукты здоровья

Российская Федерация, 170002, г. Тверь, ул. Коминтерна д. 47/102, офис 101. Тел. 8-800-333-16-60